

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Analysenavn</b>               | Csv—Immunglobulin G (oligoklonale bånd); taxon  |
| <b>Kortnavn</b>                  | Immunglobulin G(oligoklonalt);Csv   |
| <b>Synonym</b>                   | -   |
| <b>Forkortelse</b>               | IGGOLIG-CSV   |
| <b>IUPAC kode</b>                | DNK35938  |
| <b>Kvantitetsnummer</b>          | 001012  |
| <b>Instruktion for rekvirent</b> | <p>Analyseres dagligt</p> <p>De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenede med vævsvæske eller blod.</p> <p>Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Klinisk Kemisk Afdeling, der i forvejen er blevet adviseret.</p> <p>Rutineprøver skal være Klinisk Kemisk Afdeling i hænde sendest kl. 14.00.</p> <p>Der skal samtidig bestilles en blodprøve P—Protein, elektroforetisk, fraktioneret, der skal sendes sammen med spinalvæsken.</p>   |
| <b>Prøvemateriale</b>            | <p>5 mL spinalvæske i spidsglas med skrivefelt.</p> <p>1 mL serum</p> <p>Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.</p>   |
| <b>Prøvetagning</b>              | <p>5 mL spinalvæske i spidsglas med skrivefelt.</p> <p>Blodet tages i <a href="#">RØD 6</a>.</p>  |
| <b>Referenceinterval</b>         | Se svarseddel.  |
| <b>Analyseusikkerhed</b>         | -   |
| <b>Unormale værdier</b>          | <p>Undersøgelsen anvendes især i forbindelse med mistænkt multipel sclerose (MS), men anvendes i alle tilfælde, hvor spinalvæsken ønskes undersøgt for intrathekal IgG syntese. Et sikkert indicium for en sådan syntese er fund af oligoklonalt IgG båndmønster i spinalvæsken, et mønster der ikke kan genfindes i serum. Et næsten lige så sikkert mål for intrathekal IgG syntese er øget IgG index (større end 0,6).</p> <p>Ved MS er blodhjernebarrieren oftest ikke med disse målemetoder mærkbart nedbrudt, dvs. Sp/S koncentrationsratio for Albumin er normal (mindre end <math>10,5 \times 10^3</math>).</p> <p>Selv beskeden blodtilblanding af spinalvæsken ødelægger IgG index og evt. albumin ratio.</p> |

Seneste opdatering 23.05.13