

<b>Analysenavn</b>	P—Sexualhormonbindende globulin; stofk.
<b>Kortnavn</b>	Sexualhormonbindende globulin:P
<b>Synonym</b>	-
<b>Forkortelse</b>	SHBG
<b>IUPAC - kode</b>	NPU03419
<b>Kvantitetsnummer</b>	001721
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt
<b>Prøvemateriale</b>	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
<b>Prøvetagning</b>	Blodet tages i <a href="#">LGRØN 4,5</a> .
<b>Referenceinterval</b>	Nedenfor er anført et mere specificeret referenceområde end i BCC.
	Kvinder Pre-menopausalt                    20 - 140 nmol/L Ved indtag af p-piller            70 - 640 nmol/L Post-menopausalt                14 - 110 nmol/L  Mænd 15 - 40 år                        13 - 55 nmol/L 41 - 66 år                        11 - 80 nmol/L
<b>Analyseusikkerhed</b>	10 %
<b>Unormale værdier</b>	<p>Steroidbindende globulin binder især testosterone, men også østradiol i betydelig grad. SHBG dannes i leveren.</p> <p>Forhøjede værdier ses ved hypogonadisme, hyperthyreoidisme og behandling med østrogen, clomifen og antiepileptika.</p> <p>Nedsatte værdier ses ved Cushings syndrom, hypothyreoidisme, fedme, hirsutisme, polycystisk ovariesygdom og behandling med glucocorticoider og androgen.</p>

Seneste opdatering 23.08.18